

## Kort brugsvejledning



**1** Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Væskens overflade skal være mellem de to linjer på kuvetten. Berør ikke de klare, flade overflader på kuvettens nederste del.



**2** Tør første dråbe af finger. Fyld kapillærrøret med prøvematerialet (10 µl) op til den hvide stopklods. Kontroller, at der ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tør eventuelt overskydende prøvemateriale af kapillærrørets yderside.



**3** Anbring prøven (10 µl) i bufferopløsningen i kuvetten, og tilsæt prøven ved at trykke stemplet ned. Kontroller, at kapillærrøret er helt tomt.



**4** Luk kuvetten helt tæt med et wrCRP reagenslåg. Tryk ikke den inderste turkise del af låget ned. Når prøven er tilsat bufferen, skal testen køres inden for to timer.



**5** Vælg Måling på displayet på QuikRead go instrumentet.



**6** Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv. Displayet viser, hvordan målingen forløber.



**7** Når målingen er gennemført, vises resultatet på displayet, og kuvetten vil automatisk komme op af aflæsningsbrønden. For QuikRead go wrCRP+Hb testen bliver Hb-resultatet vist nedenunder CRP-resultatet.

*Læs venligst  
brugsvejledningen,  
inden testen udføres*

## Opbevaring af reagens



### Æske

Opbevaring af uåbnet kit ved 2–25 °C:  
Indtil kittets udløbsdato



### Uåbnede kuvetter efter åbning af folieindpakningen

Opbevaring ved 2–8 °C:  
6 måneder  
Opbevaring ved 18–25 °C:  
3 måneder



### Reagenslåg

Uåbnet rør opbevaret ved 2–25 °C:  
Indtil kittets udløbsdato  
Opbevaring ved 2–25 °C efter åbning:  
6 måneder



### Åbnet kuvette

Prøven er stabil i bufferen i to timer.  
Udfør testen indenfor for **to timer**, efter at du har åbnet kuvetten. Lad bufferen blive opvarmet til stuetemperatur, inden du udfører testen.



### CRP Control (se skemaet nedenfor)

Uåbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:  
Indtil udløbsdato  
Åbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:  
Op til to måneder



### Hb Control (se skemaet nedenfor)

Uåbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:  
Indtil udløbsdatoen  
Åbnet flaske opbevaret ved 2–8 °C:  
Op til en måned



Orion Diagnostica Oy / Danmark  
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark  
Tlf. 8610 3020  
www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com

8046-01DK for Wholesalers, 09/2018

Produkt	Varenr.
QuikRead go wrCRP, 500 test	146522
QuikRead go wCRP+Hb, 50 test » med kapillærrør og stempler	146255
QuikRead CRP Control 1 ml	153038
QuikRead go CRP Control High 1 ml	153039
Ultrasensitive CRP Control 1 ml	132698
QuikRead go Hb Control 1 ml	141154
QuikRead go 10 µl kapillærrør, 50 stk	147851
QuikRead stempler, 50 stk	132655
QuikRead go instrument	135867
QuikRead workstation, 1 stk	136206

Se yderligere information på: [www.quikread.com](http://www.quikread.com)