

PRODUKTDATABLAD

Eakin Cohesive ring

Eakin ringen kan anvendes til alle typer stomi og modelleres og formes, så den passer til netop din stomi. Ringen er alkoholfri og svier derfor ikke, så den irriterede hud kan heles under ringen. Er yderst hudvenlig.

For bedre klæbeevne og nemmere modellering opvarmes ringen i hænderne i et minuts tid. Ringen kan deles og sættes sammen igen, hvis der er behov for dette. To ringe kan også brydes og modelleres i forbindelse med hinanden, hvis stomien har en meget stor diameter.

Den almindelige ring findes i to størrelser (48 eller 98 mm). Den store ring dækker og beskytter et større hudområde f.eks. under hele pladens klæber. Den lille ring er ekstra tyk og hjælper ved massive lækageproblemer og skadet hud.

StomaWrap ringen passer bedst til store eller ovale stomier eller til brugere med nedsat fingerfærdighed

SLIMS® er en tyndere ring, som forebygger lækage og giver komfort samt sikkerhed til alle typer stomi. Er egnet til brugere, der ofte skifter stomipose og kan anvendes sammen med en forudstanset plade/pose for at dække en rest af hud, som muligvis er ubeskyttet. Ideel til brug sammen med konvekse produkter.



Indholdsstoffer/materiale:	Polybuten, sodium carboxymethylcellulose, kulhydratblanding
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Eakin Cohesive ring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399600	Eakin	Cohesive ring 4,2 mm, hul 19 mm	48 mm Ø	Æske a 30 stk.	839002
0399602	Eakin	Cohesive ring 2,1 mm, hul 19 mm	98 mm Ø	Æske a 10 stk.	839001
0399604	Eakin	Cohesive SLIMS ring 3 mm, hul 19 mm	48 mm Ø	Æske a 30 stk. – Krt. a 50 æsker	839005
0399706	Eakin	Cohesive StomaWrap tætningsring 3 mm, hul 50 mm	85 mm Ø	Æske a 10 stk.	EA839006