



BRUGSANVISNING FOR HAWODENT 270 MS-3

Hd 270 MS-3 svejsemaskinen svejser en 3 mm bred svejsesøm. På grund af denne bredde på svejsesømmen, anvendes den specielt til lukning af sterileballage til tørsterilisation.

Idriftsættelse

1. Sæt netstikket i stikkontakten
2. Indstil "svejsetid" ved hjælp af piletaster.  

OBS!

Indstilling af svejsetiden må kun ske trinvist, med udgangspunkt i indstillingen "0", hvorefter den tilsvarende indstilling kan bibeholdes, når den rette svejsesømkvalitet er opnået. Ved konstant svejsning kan indstillingen sættes ned.

Undgå at svejse uden folie

3. Placér folien mellem svejsekæberne og luk svejsekæberne manuelt, ved hjælp af håndtaget.

OBS!

Undgå at placere genstande mellem svejsekæberne, da disse trykker eller ødelægger varmebåndet, således at svejsesømmens tæthed som følge deraf ikke længere er korrekt på dette sted.

Når min. trykket er opnået, standser svejsningen automatisk efter den indstillede tid. Under svejsetiden lyser den grønne kontrollampe.

4. Det komplette svejseforløb er afsluttet, når lampen slukkes.
5. Åben svejsekæberne ved hjælp af håndtaget.
6. Hvis svejsekæberne bliver varme, mens apparatet er i drift, skal svejsetiden reduceres lidt, ved at dreje drejeknappen til venstre.
7. Når svejsemaskinen ikke benyttes, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.

