

# microINR

## Kort brugsvejledning

1



Sæt testchippen i instrumentet, ved at holde på den gule del. Chippen er korrekt isat, når teksten **microINR** kan læses. Instrumentet udfører en kvalitetskontrol, og testchippen opvarmes.

2



Når testchippen er opvarmet.

- Bipper instrumentet
- Dråbesymbolet blinker
- Nedtælles fra 80 sek.

Instrumentet er nu klar til analyse.

3



Tilsæt 1 dråbe kapillær blod **inden de 80 sekunder er gået**. Kun dråben må berøre testchippen, så kanalen i testchippen ikke tilstoppes.

4



Instrumentet bipper, når der er tilstrækkelig mængde prøve i testchippen (3µl). **Fingeren holdes i nogle sekunder, før den langsomt trækkes væk.**

5



Resultatet vises på displayet inden for 1 minut.

For yderligere information, se kit insertet

# microINR

## Yderligere information

### Om instrumentet

- Instrumentet startes når der isættes en testchip, eller ved at trykke på SET / Tænd knappen.
- Instrumentet har indbygget lithiumbatteri, som er genopladeligt via mini-USB-stikket. Det tager ca. 3 timer at lade batteriet helt op. Når batteriet er fuldt opladet kan det udføre mindst 100 målinger.
- Instrumentet kræver ikke særlig rengøring eller vedligeholdelse, det kan dog aftørres med en fugtig klud efter behov.
- Instrumentet fungerer ved temperaturer på 15-35 °C.
- Instrumentet har en resultathukommelse på 200 målinger.
- Instrumentet slukker automatisk efter 5 min. eller ved at trykke på OK / Sluk knappen i 3-4 sekunder.



### Om testchippet

- De enkeltpakkede testchips er holdbare indtil udløbsdatoen, når de opbevares ved stuetemperatur (2- 25°C).
- Testchipsene kan anvendes op til 6 timer, efter at foliepakningen er åbnet.
- Kalibreringsoplysningerne er indbygget i testchipsene, så der er ikke behov for separat kalibrering.



### Om prøvetagningen

- **Bemærk!** Udfør ikke fingerprykket, før instrumentet giver et signal om, at testchippet er opvarmet.
- Fingeren skal være varm inden prøvetagning, evt. opvarmes med varmt vand. Fingeren skal aftørres grundigt.
- Såfremt fingeren desinficeres, skal den være tør, før prøvetagningen foretages.
- Prøven skal tages fra siden af langfingeren eller ringfingeren.

