

QuikRead® CRP prefyldte cuvetter

Kort brugsvejledning

1



Indlæs magnetkortet.

- Når instrumentet har været slukket.
- Når et nyt kit tages i brug.

2



Åben cuvetten.

3



Tilsæt 20 µl fuldblod.

4



Sæt låget på og bland forsigtigt (ikke op og ned) til prøven er klar rød. Sæt cuvetten i aflæsningsbrønden.

5



Efter "blank" måling i max. 40 sek. tilsættes CRP-reagens ved at trykke den inderste del af låget ned.

6



Tag cuvetten op og ryst den **kraftigt** frem og tilbage. Sæt cuvetten tilbage i aflæsningsbrønden.

7



Instrumentet måler CRP koncentrationen i mg/L:
QuikRead: Indenfor 120 sek.
QuikRead 101: Indenfor 60 sek.
Aflæs resultatet.

For yderligere information, kontakt Orion Diagnostica A/S.



Orion Diagnostica A/S, Møllevej 9A, 2990 Nivå, Danmark

Tlf: 45 4975 5050, Fax: 45 4975 5055, e-mail: orion@oriondiagnostica.dk, www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com

QuikRead® CRP prefyldte cuvetter

Opbevaring af reagens



Uåbnet kit æske

Opbevaring ved 2–8°C:

- Indtil udløbsdatoen på kittet.



Cuvetter i uåbnet foliepakning

Opbevaring ved 2–25°C:

- Indtil udløbsdatoen på kittet.



Uåbnede cuvetter efter åbning af foliepakning

Opbevaring ved 2–8°C:

- 6 måneder

Opbevaring ved 18–25°C: • 3 måneder



Reagenslåg

Opbevaring ved 2–8°C:
Indtil udløbsdatoen på kittet.

Opbevaring ved 18–25°C:
1 måned.

Opbevaring ved 18–25°C:
7,5 timer/dag - 3 måneder.



Åbnet cuvette

Bufferen skal have stuetemperatur, før testen udføres.

Testen skal udføres inden 2 timer fra cuvetten åbnes.



QuikRead CRP Control

Opbevaring ved 2–8°C:

Uåbnet flaske: Indtil udløbsdatoen

Åbnet flaske: 2 måneder